

Pršilo ZA NOS

z morsko soljo iz Bretanje

ČISTI, VLAŽI
NEGUJE IN ŠČITI



PRŠILO ZA NOS

Čisti, vlaži, neguje in ščiti nosnice.
Medicinski pripomoček CE.

Navodila za uporabo: natančno jih preberite!

Vsak dan preko nosa vdihujemo onesnaževala. Izpušni plini, ozon, prah, cvetni prah in virusi nosno sluznico postavljajo na težko preizkušnjo, medtem ko jo ogrevani prostori še dodatno izsušujejo. Nosna sluznica mora torej biti dobro očiščena in hkrati navlažena.

Kaj je Pršilo za nos in kdaj ga uporabljamo?

Je izotonična fiziološka raztopina z morsko soljo iz Bretanje, obogatena z aromatičnimi izvlečki rdečega čaja, koriandra in pegatega badlja. Nežno a temeljito očisti nosnice, saj odstrani nečistoče, kot so sluz, nosne skorje in vdihnjeni prašni delci. Navlaži nosno sluznico in pomirja razdraženost v primeru alergijskih reakcij na cvetni prah, onesnaženost iz okolja itd. Spodbuja celjenje manjših površinskih poškodb nosne sluznice.

Pršilo za nos:

- se uporablja za simptomatsko in podporno lajšanje rinitisa (prehlada) in alergijskega rinitisa (alergijskega prehlada);
- se uporablja za preventivo in podporno lajšanje vseh težav, ki jih povzroča suha in razdražena nosna sluznica;
- ščiti in čisti nosno sluznico pred posledicami negativnih vplivov iz okolja, kot so suh zrak zaradi ogrevanja, prah, izpušni plini, ozon, cvetni prah, alergeni, bakterije, trosi in virusi;
- blaži simptome prehlada, kot sta zamašen nos in suhost nosne sluznice;
- blaži simptome alergije na cvetni prah, kot sta srbečica in oteklina, in zmanjšuje napade kihanja (ob redni uporabi);
- pomirja in obnavlja nosno sluznico in vlaži;
- zmanjšuje vnetne procese nosne sluznice in tveganje za vnetje sinusov;
- podarja olajšanje, udobje in občutek prostega nosu in torej prispeva k boljšemu dihanju;
- koža in sluznica ga dobro prenašata, poleg tega ne vsebuje konzervansov.

Kaj vsebuje Pršilo za nos?

Prečiščeno vodo, morsko sol iz Bretanje (0,9 %), izvleček ploda koriandra (*Coriandrum sativum*), izvleček listov rdečega čaja (*Aspalathus linearis*), izvleček pegatega badlja (*Silybum marianum*), monohidratno citronsko kislino, natrijev bikarbonat, dušik (plin), glicerol.

Ali se Pršilo za nos lahko varno uporablja dlje časa?

Da.

Kdaj se Pršila za nos ne sme uporabljati?

Izdelka se ne sme uporabljati v primeru alergij in preobčutljivosti na eno ali več vsebovanih snovi. V primeru poškodb nosu, krvavitev nosne sluznice ali po operativnih posegih nosu in obnosnih votlin se izdelka prav tako ne sme uporabljati. Izdelek se lahko varno uporablja v nosečnosti in v obdobju dojenja.

Kako se uporablja Pršilo za nos?

Razpršite 1- do 2-krat do 4-krat dnevno, po potrebi. Nagnite glavo rahlo naprej. Prilni nastavek vstavite v nosnico in kratko pritisnite na pršilnik. Spustite pršilnik in zaključite nanos. Nastavek pršilnika po vsaki uporabi temeljito očistite. Iz higienskih razlogov Pršila za nos ne sme uporabljati več kot ena oseba. Za odrasle in otroke od 2 let dalje.

Kakšne stranske učinke ima lahko Pršilo za nos?

Do sedaj stranski učinki Pršila za nos niso poznani, če se izdelek uporablja pravilno. V posameznih primerih pri uporabi Pršila za nos ni mogoče izključiti nekaterih neželenih učinkov, kot so kihanje, grenek okus, pekoč občutek. Zadrževanje fiziološke raztopine v obnosnih votlinah lahko povzroči zakasnelo iztekanje tekočine.

Na kaj je še treba biti pozorni?

- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ni primerno za otroke, mlajše od 2 let.
- Posoda je pod tlakom (atmosferski dušik, nevtralen in neškodljiv za okolje). Zaščitite pred sončno svetlobo in toploto.
- Ne odpirajte na silo in ne sežigajte.
- Izdelek se lahko uporablja samo do navedenega datuma uporabnosti.
- Izogibajte se stiku z očmi.
- Pred uporabo preverite, ali izdelek ni poškodovan. Hranite pri temperaturi pod 25 °C.

Pazi: O vsaki hudi nesreči, do katere pride zaradi reakcije na izdelek, je treba obvestiti proizvajalca in pristojne organe v državi bivanja uporabnika in /ali pacienta.

Uporabnik:

Sporočilo proizvajalcu ali zdravstveni ustanovi/lekarni ali splošnemu zdravniku, ki nato obvesti proizvajalca in ministrstvo za zdravje po postopkih, določenih za zdravstvene delavce.